

Sterylna osłona na głowicę USG



Regionalna anestezja

Instrukcja założenia osłony na głowicę USG

1 Odnajdź fałd osłony foliowej z naklejką z rysunkiem dłoni

2 Włóż rękę w fałd osłony gdzie naklejka z rysunkiem dłoni



4 Podnieś, ręką w osłonie, z uchwytu głowicę USG lub weź głowicę od osoby asystującej Ci

5 Trzymając głowicę USG przez głowicę i kabel



Nałóż małą ilość sterylnego żelu znajdujący się w zestawie z osłoną głowicy USG



folię, drugą ręką naciągnij osłonę na



Różne sposoby mocowania osłony na głowicy USG



Mocowanie za pomocą
załączonych gumek



Mocowanie za pomocą
samoprzylepnych taśm



Dla osiągnięcia czytelnego obrazu USG
upewnij się, że nie ma pęcherzyków
powietrza między osłoną a głowicą USG.

Sterylna osłona na głowicę USG

Opis produktu	Rozmiar osłony	Ilość w opakowaniu (szt)	Nr katalogowy
Zawartość			
Długa osłona na głowicę USG	13 x 122 cm	20	4892080
Krótką osłona na głowicę USG	13 x 61 cm	20	4892081
W skład każdego zestawu wchodzi			
<ul style="list-style-type: none">■ Sterylny żel do USG prod. Parker Laboratories (1x20g)■ Nie zawierające lateksu gumki mocujące osłonę na głowicy USG (2x)■ Sterylnie samoprzylepne taśmy mocujące osłonę głowicy USG (2x)■ Niebieska sterylne serweta (40 x 40 cm)			



Korzyści dla użytkownika

- Łatwy w użyciu dla bezpieczeństwa pacjenta
- Nie wpływa na jakość obrazu USG
- Zestaw zapewnia wszystkie konieczne elementy dla wygody użytkownika, włączając w to wysokiej jakości żel i różne systemy mocowania.
- Osłony dostępne w dwóch różnych długościach