

# JEDNOFAZOWE TABLETKI CHLOROWE DO MYCIA I DEZYNFEKCJI

## Actichlor Plus

Wysoka skuteczność dezynfekcji

Tabletki o wysokiej skuteczności dezynfekcyjnej i wysokiej efektywności mycia dzięki zawartości anionowych tenzydów myjących.

- ▲ Przyjemny zapach
- ▲ Szeroki zakres stężeń
- ▲ Z dodatkiem substancji myjących
- ▲ Szerokie spektrum działania



# Actichlor Plus

Wysoka skuteczność dezynfekcji

## Dlaczego Actichlor Plus?

Preparat posiada dobre właściwości myjące dzięki zawartości specjalnych tenzydów nieulegających utlenieniu przez chlor i szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, prątki gruźlicy (*Mycobacterium tuberculosis*), grzyby i wirusy (łącznie z wirusami Polio, Adeno, HBV, HCV, HIV). Szybko i całkowicie rozpuszczalne tabletki musujące zawierają aktywny chlor. Stabilne połączenie tenzydu z substancją aktywną zapewniają wszechstronne zastosowanie przy niskim stężeniu użytkowym.

### KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

- Skuteczna dezynfekcja wszystkich zmywalnych powierzchni. Możliwość dezynfekcji poprzez zanurzenie sprzętu, który nie jest zanieczyszczony substancją organiczną.
- Możliwość jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni. Oszczędność czasu i pracy.

- Łatwość przygotowania roztworu, nie wymaga stosowania pomocy aplikacyjnych ani urządzeń dozujących.
- Sprawdzona substancja aktywna. Szybkie działanie wirusobójcze i prątkobójcze - również w obecności wysokiego obciążenia substancją organiczną.
- Tabletki do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń (mających również kontakt z żywnością).
- Niski koszt roztworu.
- Długi okres trwałości.
- Pełne bezpieczeństwo użytkownika.

Instrukcja dozowania		Actichlor Plus									
Ogólna dezynfekcja powierzchni (1 000 ppm)	Ilość tabletek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Litry wody	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Plamy krwi, wydaliny, wydzieliny (10 000 ppm)	Ilość tabletek					5					10
	Litry wody					0,5					1,0
EN 13704 działanie sporobójcze (5 000 ppm)	Ilość tabletek					5					10
	Litry wody					1,0					2,0
EN 13704 działanie sporobójcze (10 000 ppm)	Ilość tabletek					5					10
	Litry wody					0,5					1,0

# TABLETKI CHLOROWE DO MYCIA I DEZYNFEKCJI

## OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Ogólna dezynfekcja powierzchni, również do dezynfekcji przez zanurzenie basenów, kaczek itp. (1 000 ppm) / Actichlor Plus 1 tabl. / 1 l wody, Spektrum: B, F, V, Tbc.
- Plamy krwi, wydaliny, wydzieliny, (10 000 ppm) / Actichlor Plus 10 tabl. / 1 l wody, Spektrum: B, F, V, Tbc.
- Clostridium difficile* (R 027), (10 000 ppm) / Actichlor Plus 10 tabl. / 1 l wody, EN 13704 działanie sporobójcze: 5 tab./1 l wody (5 000 ppm): 10 min. lub 10 tab./1 l wody (10 000 ppm): 5 min.

## SPOSÓB POSTĘPOWANIA

- Przetrzeć lub zmyć powierzchnię, dezynfekowane przedmioty (kaczka, basen) zanurzyć w roztworze. Czas działania 15 min. W przypadku mycia - dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i/lub środkami żywienia zwierząt po zakończeniu procesu wszystkie powierzchnie mające kontakt z preparatem należy dokładnie spłukać wodą.
- Po całkowitym rozpuszczeniu tabletek przeprowadzić dezynfekcję poprzez zalanie roztworem dezynfekowanego miejsca. Pozostawić na co najmniej 15 minut i usunąć używając ręczników jednorazowych. Następnie przeprowadzić dezynfekcję powierzchni z użyciem preparatu Actichlor i wytrzeć powierzchnię wilgotnym ręcznikiem jednorazowym. Wszystkie pozostałe odpady odpowiednio zabezpieczyć i przekazać do utylizacji.
- Po całkowitym rozpuszczeniu tabletek przeprowadzić dezynfekcję poprzez zmycie powierzchni preparatem. Dezynfekowane przedmioty (kaczka, basen) zanurzyć w roztworze. Czas działania 15 min. W przypadku powierzchni zanieczyszczonych, roztwór po upływie czasu działania (15 min.) wraz z zanieczyszczeniami usunąć przy pomocy ręczników jednorazowych, a następnie przeprowadzić powtórny dezynfekcję przy pomocy roztworu preparatu Actichlor Plus.

## SKŁAD

Każda tabletkę preparatu Actichlor Plus o masie 4,10 g zawiera jako substancję aktywną 1,7 g troklozenu sodu. 100 g produktu zawiera następujące ilości substancji czynnych: 41,4 g troklozenu sodu.

## DOSTĘPNE OPAKOWANIA

OPIS	ILOŚĆ	KOD PRODUKTU
Pojemnik 150 tabl. x 4,1 g	6 szt.	3053530

Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Środki dezynfekcyjne stosuj bezpiecznie. Przed użyciem zapoznaj się z etykietą produktu. Pozwolenie MZ nr 2791/05 na obrót produktem biobójczym.